

Tubifast® 2-Way Stretch®


Tubebandage af høj kvalitet, som giver brugerne fuld bevægelsesfrihed

- 2-Way Stretch® teknologien gør det muligt for bandagen at forme sig efter forskellige dele af kroppen
- Let elasticitet i både lodret og vandret retning giver brugerne fuld bevægelsesfrihed¹
- Intet behov for strips eller tape
- Let at bruge: kan klippes til i den ønskede længde
- Latexfri
- Kan vaskes og genbruges
- Fås i 5 farvekodede størrelser, der passer til alle dele af kroppen




Tubifast® 2-Way Stretch® tubebandage er designet til fiksering af bandager uden brug af sikkerhedsnåle eller tape, og til fugtig og tør tildækning. Tubifast kan også bruges til beskyttelse af huden på alle dele af kroppen og til behandling af Epidermolysis Bullosa².


Sådan anvendes Tubifast® 2-Way Stretch®

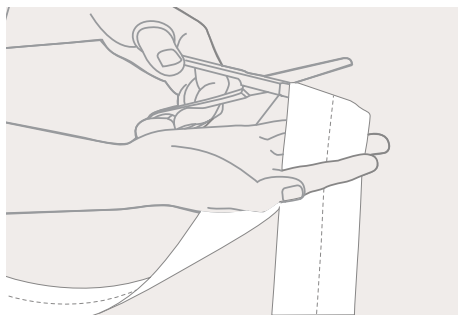

1. Vælg den rette tubebredde ved hjælp af farvetråden, og klip den til i den ønskede længde.

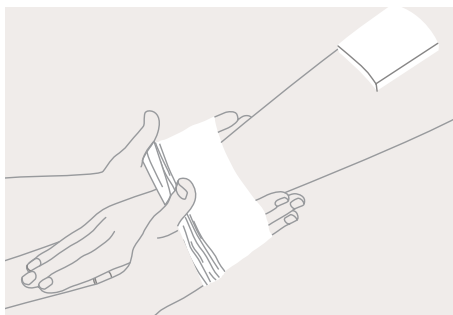

2. Træk Tubifast® 2-Way Stretch® over det berørte område.

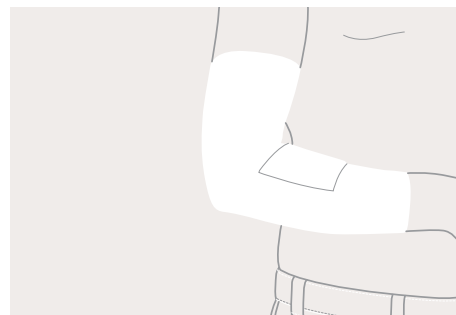

3. Placer Tubifast® 2-Way Stretch®, så den dækker bandagen. Se appliceringsguide for flere avancerede appliceringer.

Sådan virker Tubifast® 2-Way Stretch®

Tubifast® 2-Way Stretch® behøver ingen sikkerhedsnåle eller tape for at blive på plads, og dens tubulære konstruktion tillader luft at cirkulere over huden. Tubifast® 2-Way Stretch® giver en let elasticitet i både lodret og vandret retning, hvilket giver patienterne fuld bevægelsesfrihed.

Fordele ved Tubifast® 2-Way Stretch®

- Former sig efter kroppens konturer takket været 2-Way Stretch® teknologien
- Giver fuld bevægelsesfrihed
- Let at bruge: kan klippes til den ønskede længde
- Forbliver sikkert på plads uden brug af sikkerhedsnåle eller tape
- Latexfri, ikke-sensibiliserende og ikke-irriterende
- Kan genbruges efter vask
- Fås i 5 farvekodede størrelser, der passer til alle dele af kroppen

Anvendelsesområder

Tubifast® 2-Way Stretch® tubebandage er designet til fiksering af bandager uden brug af sikkerhedsnåle eller tape. Den er særligt velegnet til fiksering på vanskelige områder som f.eks. amputationsstumper.

Produktet er også designet til våd og tør tildækning (wrapping) og til brug under gips. Tubifast® 2-Way Stretch® kan også bruges til beskyttelse af huden på alle dele af kroppen og til behandling af Epidermolysis Bullosa²

Fiberindhold

Viskose, elastan og polyamid

Tubifast® 2-Way Stretch® sortiment

Produkt	Bredde x længde	Omkreds	Varenr.	Stk./in-derkrt.	Stk./trp.krt.
RØD					
Små	3,5cm x 1m	9-18cm	2480	12	36
ekstremiteter	3,5cm x 10m	9-18cm	2434	1	20
GRØN					
Små- og	5cm x 1m	14-24cm	2481	12	36
mellemstore	5cm x 10m	14-24cm	2436	1	24
ekstremiteter					
BLÅ					
Store	7,5cm x 1m	24-40cm	2482	12	36
ekstremiteter	7,5cm x 10m	24-40cm	2438	1	30
GUL					
Ekstra store	10,75cm x 1m	35-64cm	2483	12	36
ekstremiteter, hoved, helkrop til børn	10,75cm x 10m	35-64cm	2440	1	12
LILLA					
Stor helkrop, voksne	20cm x 1m	64-130cm	2479	12	48
	20cm x 10m	64-130cm	2444	1	15

Tubifast® 2-Way Stretch® er pakket i enkeltpakninger

Vaskeinstruktioner



Referencer: 1. Eytier C, Gazeau E, Beneteau G, Verfaillie G. Convenience and tolerance of the combination of a soft silicone foam dressing and a two-way stretch tubular bandage in the management of local wounds. Journal des plaies et cicatrisations 2013;18(88):38-44. 2. Mölnlycke Health Care. Data on file.

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: +45 80 88 68 10. info.dk@molnlycke.com
Mölnlycke, Tubifast og 2-Way Stretch varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care Gruppen. ©2024 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKWC2142405


Mölnlycke®